

## スープレン吸入麻酔液(一般名:デスフルラン)注入作業終了時のボトル操作について

謹啓

平素は格別のご高配を厚く御礼申し上げます。

スープレン吸入麻酔液を気化器(D-Vapor)に注入する際の注意及び皮膚等へスープレン吸入麻酔液が付着した場合の処置について、下記のとおりご案内させていただきます。

スープレン吸入麻酔液を気化器にボトルから注入し、そのボトル内部の吸入麻酔液が気化器の内部に完全に注入される前に、素早くそのボトルを気化器から引き抜くと気化器の注入口から吸入麻酔液が噴出する可能性があります。これを避けるためには吸入麻酔液を気化器に注入完了後、2～3 秒間お待ち頂いてから吸入麻酔液のボトルを気化器からゆっくりと引き抜いて頂きますよう、ご協力をお願いいたします。


今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

### 注入手順の終了 (D-Vapor 取扱説明書より)

1. 麻酔薬ボトルを下方に押すのをやめます。
2. **麻酔薬が気化器にまだ流入することがあるため、引き抜く前に 2-3 秒待ちます。**
3. ロック解除ボタンを押して、麻酔薬ボトルを注入口からゆっくりと引き抜きます。
4. 液面計の注入レベルを確認してください。注入レベルが目視でき、最大マークを超えていないことを確認します。
5. シーリングプラグを注入口に挿入し、ロックが固定されるまで押します。

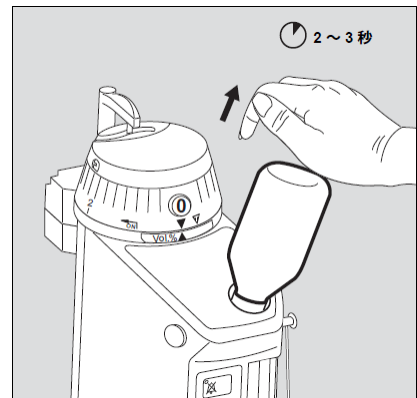

### スープレンが皮膚等へ付着した時の応急措置

皮膚に付着した場合：	皮膚を大量の水で速やかに洗浄する。汚染された衣類及び履物を脱ぐこと。刺激が生じた場合は医師の診断/手当てを受けること。
眼に入った場合：	直ちに大量の水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズを装着していて容易に取り外せるなら取り外して、その後も洗浄を続ける。刺激のある場合は医師の診断/手当てを受けること。

Baxter 社内資料 スープレン吸入麻酔液 安全データシート(製品 ID:1087152)より抜粋  
販売名:スープレン吸入麻酔液、承認番号:22300AMX00519000

以 上

D-Vapor 取扱いに関する問合せ先：  
ドレーゲル・メディカルジャパン株式会社  
マーケティング部 電話番号：03-6447-7222  
スープレン吸入麻酔液に関する問合せ先：  
バクスター株式会社  
ホスピタルプロダクト事業部 電話番号:03-5961-7920